

はじめに

本書は「フォナック テレビ リンク」とそのセット商品「フォナック テレビ パッケージ」との説明書を兼ねております。内容については「フォナック テレビ パッケージ」に準じておりますので予めご承知おきください。

このたびはフォナック社製品をお選びいただき、誠にありがとうございます。

フォナック テレビ パッケージはフォナック テレビ リンクとマイコムとのセット商品です。フォナック テレビ リンクは、テレビや音楽機器に接続して使用する Bluetooth アダプターで、フォナック補聴器専用ワイヤレスアクセサリーのフォナック マイコムと共に利用します。

ご使用いただく前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。取扱説明書で不明な点がありましたら、本取扱説明書に記載されております「お客様相談窓口」までお問合せください。

なお、本書ではフォナック テレビ リンクを「TV リンク」、フォナック テレビ パッケージを「TV パッケージ」、フォナック マイコムを「マイコム」とそれぞれ省略して記載します。

安全上のご注意（必ずお守りください）

- お使いになる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。また、お読みになった後は大切に保管ください。
- ここに示した注意事項は、お使いになる人や他人への危害、財産への損傷を未然に防ぐための内容を記載しておりますので、必ずお守りください。
- 次の表示区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる危害や損害の程度を説明しています。

⚠危険	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重症を負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。
⚠警告	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重症を負う可能性が想定される」内容です。

⚠注意	この表示は、取り扱いを誤った場合、「損傷を負う可能性が想定される場合および物的損害のみの発生が想定される」内容です。
-----	--

⚠危険	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 本体および AC アダプターは絶対に分解、改造をしないでください。火災、けが、感電などの事故または故障の原因となります。</li> <li>● 濡らさないでください。発熱、感電、火災、故障、けがなどの原因となります。使用場所、取り扱いに注意してください。</li> <li>● 火のそばや、直射日光の強いところ、炎天下の車内など高温の場所に放置をしないでください。</li> </ul>
-----	--

⚠警告	<ul style="list-style-type: none"> <li>● AC アダプターのケーブルを無理に曲げたり、上に重いものをのせたりしないでください。ケーブルに傷がついて火災や感電の原因となります。ケーブルが傷ついた場合は使用しないでください。</li> </ul>
-----	---


⚠注意	<ul style="list-style-type: none"> <li>● フォナック指定以外の AC アダプターは使用しないでください。発熱、発火するなどして、火災や事故の原因となります。</li> <li>● 湿気の異常に多い場所や水分のかかる可能性のある場所では、絶対に使用しないでください。火災や感電、故障の原因となります。</li> <li>● AC アダプターや接続ケーブルをコンセントやコネクタから抜くときはコネクタ部分を持って外してください。ケーブル部分を引っ張ると故障の原因となります。</li> <li>● 次のような場合はただちに電源を切り、AC アダプターをコンセントから抜いてください。             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 異常な状態から回復できないとき</li> <li>- 異臭がする、煙が出た、または異常音が発生したとき</li> <li>- 本体の内部や隙間に金属片や水などの異物が入ったとき</li> </ul>             このような状態のまま使用すると、事故や火災の原因となります。           </li> <li>● 本製品はフォナック・ジャパンまたはフォナック・ジャパンが指定するサービスセンターによってのみ修理可能です。</li> <li>● 付属品はフォナック指定のものを使用してください。</li> </ul>
-----	--

本体付属品

- TV リンク本体
- AC アダプター
- 音声出力用ケーブル (Yケーブル)
- ヘッドホン端子用ケーブル
- TV リンク 保証書
- 取扱説明書 (本書)

- マイコム付属品  
(TV パッケージのみ)
- マイコム本体
  - USB ケーブル
  - マイコム取扱説明書
  - マイコム保証書

各部の名称

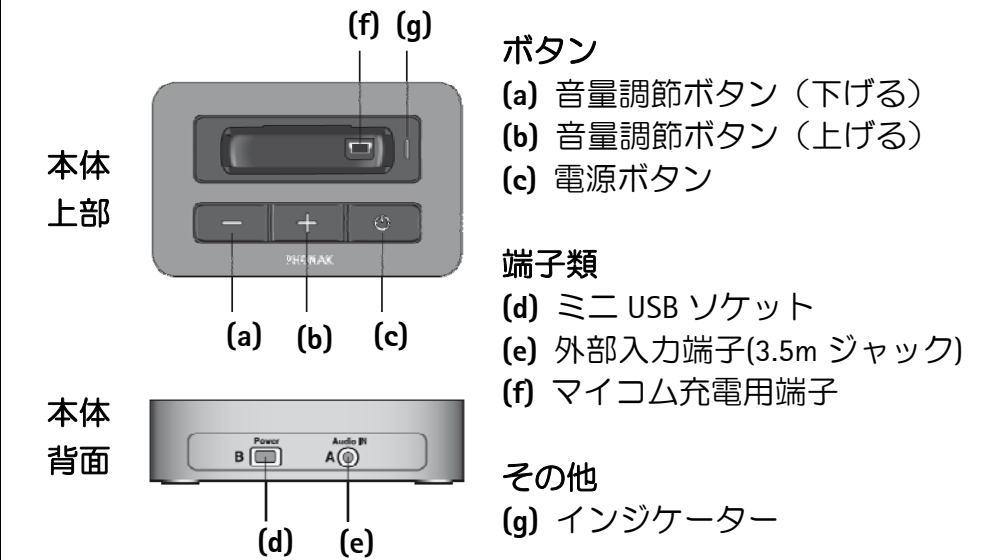

TVリンク使用イメージ



TV リンクはテレビの音声をマイコムへ Bluetooth 無線を使用して伝送します。マイコムは送られてきた音声信号をフォナック補聴器へ伝送します。TV リンクの電波が届く範囲は見通しで約 30m です。(使用環境により異なります)

- Bluetooth は米国 Bluetooth SIG, Inc.の商標です。

## TVリンクの準備

- ① 接続したいテレビに音声出力端子（赤と白）があれば、音声出力用ケーブル（Y ケーブル）の「TV」と書かれたシールが貼ってある側の端子をそれぞれ接続します。もし、音声出力があるが白のみ（モノラル）の場合は白のみ接続します。ただし、その場合は左側からのみ音声流れます。



- ② テレビに音声出力端子がない場合は、ヘッドホンまたはイヤホン端子に接続します。ヘッドホン端子用ケーブルの「TV」と書かれたシールが貼ってある側の端子を接続します。




※ ヘッドホン端子にケーブルを差し込んだ場合、通常はテレビに内蔵されたスピーカーから音が出なくなります。しかしテレビ側の設定によってスピーカーからも音が出る場合があります。詳しくはお手持ちのテレビの製造元へお問い合わせください。

- ③ ①または②で接続したケーブルの反対側（「A」と書かれたシールが貼ってある側）を TV リンクの外部入力端子(A)にしっかり差し込みます。
- ④ 最後に付属の AC アダプターを接続します。「B」と書かれたシールが貼ってある側の端子を TV リンク背面のミニ USB ソケット(B)に接続し、AC アダプターをコンセントに差し込みます。



## マイコムの準備

- ① 図のように、TV リンク本体にマイコムをセットし充電します。充電中は、マイコムのバッテリー表示がオレンジ色に点灯します。充電が完了すると緑色に点灯します。（フル充電にはおよそ 90 分かかります。初めてマイコムをご使用いただく際は、充電状態の表示が緑色に点灯しても 3 時間以上の充電を行ってください。）

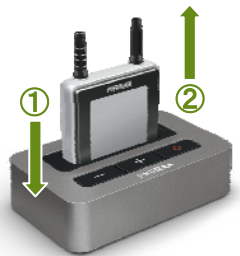

- ② 充電が完了したらマイコムを TV リンクから取り外し、電源を ON にします。電源が ON になるとバッテリー表示が点灯します。（マイコムの操作方法詳細に関しては、マイコムのクイックガイドまたは取扱説明書をご参照ください。）
- ③ 充電の際は、TV リンクおよびマイコムの電源を切ってから行って下さい。

## TVリンクとマイコムのペアリング

**TV パッケージ（セット商品）は工場出荷時点でペアリングを行っていますので、このペアリング作業は不要です。次の「TV リンクを使用する」にお進みください。すでにマイコムをお持ちの方が、TV リンク単体を購入された場合のみ、下記のペアリング作業を行ってください。**

TV リンクとマイコムをワイヤレス通信させるには、ペアリングという手続きが必要となります。ペアリングとは、Bluetooth 機器同士を通信させる際の初期登録であり、この作業は初めて使うときに一度だけ必要です。

- ① TV リンクとマイコムを 1m 以内に近づけ、それぞれ電源が OFF になっていることを確認します。
- ② マイコムの電源を入れ、Bluetooth ス・ペアリングボタンを長押し（約 2 秒）しペアリング・モードにします。Bluetooth ス表示（青）が点滅します。
- ③ TV リンクの電源ボタンを押し、電源を入れます。どの Bluetooth 機器ともまだペアリングをしていない場合は、インジケータが緑に点灯したあと青色の速い点滅に変わり、自動的にペアリングモードに移行します。2 回目以降のペアリングは、電源 OFF の状態から電源ボタンを長押しし青色の素早い点滅になるまで約 5 秒間押し続けます。
- ④ しばらくするとペアリングが完了します。完了後、TV リンクのインジケータが青色の点灯に、マイコムの Bluetooth ス表示が緑色の 1 回点滅後、青色の点灯に変わります。
- ⑤ もし 2 分以内にペアリングが終了しない場合、TV リンクは自動的にペアリングモードを終了します。その際にはもう一度はじめからペアリング操作をやり直してください。

## TVリンクを使用する

- ① ご使用の前に、マイコムの電源を ON にし、首にかけておきます。
- ② TV リンクの電源ボタンを押して電源を ON にします。
- ③ インジケータが緑色に点灯しますが、テレビからの音声が入っているときは自動的に通信を始め、TV リンクのインジケータが青色に変わります。青いランプが点灯しているときはマイコムとの通信中です。

※ 一時的に通信を止めたい場合は、マイコム中央の操作ボタンを一度押します。インジケータが青のゆっくりした点滅に変わり、一時停止状態になります。マイコムの操作ボタンをもう一度押すと通信を再開します。

※ 音量が足りない、もしくは大きすぎる場合は TV リンク上部の音量調節ボタンを使用し微調節を行ってください。調節幅は上下各 7 段階です。

※ 音が途切れたり、聞こえない場合はケーブルのジャックがしっかりと差し込まれているか確認してください。

## 最大ペアリング数

TV リンクには、マイコムを最大 4 台までペアリングすることができます。なお、2 台以上を同時に使うことはできません。

## インジケータ表示

インジケータでは、TV リンクの状態を知ることができます。

電源 ON	通信中	一時停止中	ペアリングモード
点灯(緑)	点灯(青)	緩やかな点滅(青)	速い点滅(青)

## 品質保証期間とアフターサービス

- 本製品の無償品質保証期間は、お買い上げ日より 1 年間です。
- 製品に同梱されている保証書に「販売店名」、「お買い上げ年月日」等が記載されていることを確認の上、大切に保管してください。
- お客様による誤った使用、過失、改造による故障の場合、有償修理となりますのでご了承ください。
- 保証期間内の修理の際には、保証書が必要となります。
- 本製品は付属品を含め、改良のため予告なく製品の全部または一部を変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

販売店

製造販売業

フォナック・ジャパン株式会社

〒141-0031

東京都品川区西五反田 5-2-4

レキシントン・プラザ西五反田

TEL 0120-06-4079 （お客様相談窓口）

FAX 0120-23-4080

www.phonak.jp



PHONAK  
フォナック

life is on