


# myCom 対応 携帯電話 ペアリング クイックガイド

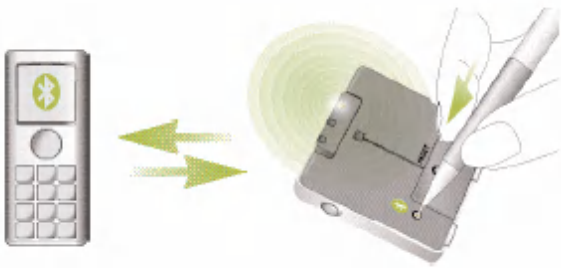

myCom はブルートゥース機能を利用し、携帯電話の音声を受信、その音声を補聴器へ伝送することができます。


お手持ちの携帯電話と myCom をワイヤレス通信させるには、ペアリングという手続きが必要となります。ペアリングとは、ブルートゥース機器同士を通信できるように許可する手続きのことを言い、最初のご使用前に必ず必要です。

ここでは一般的な各携帯電話機種と myCom とのペアリング方法をご紹介します。ご不明な点がございましたら、お客様相談窓口までお気軽にお問い合わせください。

## myCom のペアリングモードをオンにします

携帯電話と myCom を 1 m 以内に近づけ、それぞれ電源が ON になっていることを確認します。

myCom のブルートゥース・ペアリングボタンを長押し(約 2 秒)し、ペアリング・モードにします。ペアリング・モードになるとブルートゥース表示(青)が点滅します。

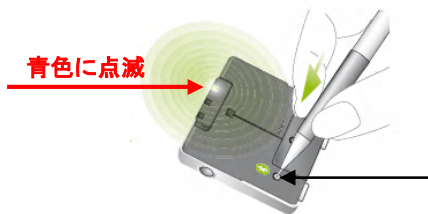

ブルートゥース・ペアリングボタン

## 携帯電話のペアリングモードをオンにします

### 【NTT docomo の一般的な操作方法】

- “メニュー”画面 ▶ “Lifekit”  
または  
“ツール” ▶ “Bluetooth” ▶ “新規登録”  
または  
“登録機器リストサーチ”
- ▶ myCom を選択 ▶ 「0000」を入力・決定 ▶ “ハンズフリー”選択  
(Bluetooth パスキー:0000)

### 【SoftBank の一般的な操作方法】

- “メニュー”画面 ▶ “設定”  
または  
“ツール” ▶ “外部接続” ▶ Bluetooth を on にする
- ▶ “周辺デバイス” ▶ “検索結果リスト”から ▶ 「0000」を入力・決定  
を検索 myCom を選択 (Bluetooth パスキー:0000)

### 【au の一般的な操作方法】

- “メニュー”画面 ▶ “アクセサリ” ▶ “Bluetooth” ▶ “初期登録”
- ▶ ハンズフリー  
機器 ▶ myCom を選択 ▶ 「0000」を入力・決定  
(Bluetooth パスキー:0000)

ペアリングに成功すると、携帯電話画面にブルートゥースのマークが表示され、アイコム のブルートゥース表示(青)が1回点滅後、点灯に変わります。

1分以内にペアリングが終了しない場合、自動的にペアリング・モードが終了します。その際にはもう一度ペアリング操作をやり直して下さい。

## 接続

携帯電話と myCom のペアリングが完了しましたら、使用(通話)する前に携帯電話と接続する必要があります。この手続きは、携帯電話のメニュー画面、通常、ペアリング(登録)完了した機器リストの中で確認できます。リストにある myCom を選択し、“接続”を行います。

接続が完了したかの確認は、myCom のブルートゥース表示で行います。青色の LED がゆっくり点滅すれば完了の合図です。