


イージー・ブーム・マイク（外部マイクロホン）の各部名称

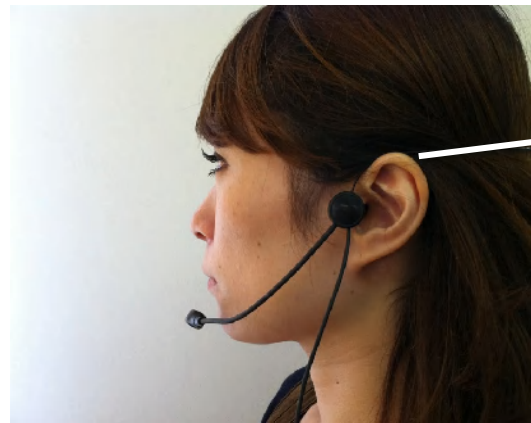

装用イメージ図

(わかりやすいようにネックバンドの位置は白くしてあります)


インスパイロ アイ・ラベル インスパイロ アイ・ブーム

inspiro iLapel/inspiro iBoomにイージー・ブーム・マイクを接続する場合

1. マイクロホンのコードをほどきます。
2. 本体裏面にあるボタンを反時計回りに回し、カバーを外します。



3. マイク接続部にストッパーがあります。先の細いペンなどでストッパーを押し込みながらマイクプラグの溝に爪を差込み、ゆっくりと引き抜きます。コード部分を引っ張りすぎると断線の原因となりますので注意してください。

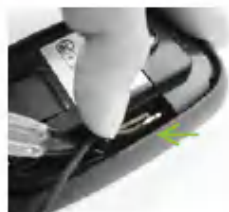

4. マイクの差し込む方向を合わせながら、しっかりと差し込んでください。



イージー・ブーム用変換ケーブル

注意点

アイ・ラベル/アイ・ブーム・マイクを外し、イージー・ブーム・マイクを使用可能にするためには、インスパイロのファームウェアバージョンが2.0.0以上になっている必要があります。バージョンの確認方法は、インスパイロの操作メニュー画面で「?ヘルプ」を選択したあと「機器情報」の「ソフト Ver.」で確認できます。バージョンアップをご希望の場合は、お買い求めの販売店にご相談ください。

イージー・ブーム・マイクの接続方法と使用方法

1. イージー・ブーム用変換ケーブルにイージー・ブーム・マイクの3.5mmミニピンプラグをしっかりと差し込みます。(図1)
2. イージー・ブーム・マイクは口元から2~5cm離します(図2)。
3. マイクの向きが横や反対側を向いていると音が入りにくくなりますのでご確認ください(図3)。ただし故障の原因になりますので、必要以上にねじらないでください。



図1

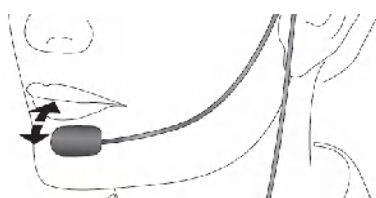


図2

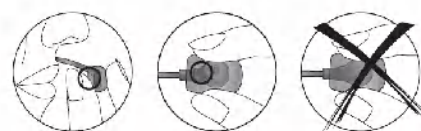


図3



装着イメージ図

ネックバンドの調整

ネックバンドが頭にフィットしない場合は、図のように調整することも可能です。

