



Life is on


「聞こえ」に悩むすべての人の声に耳を傾け、
よりよい知識、アイデア、
そして聴覚ケアをお届けする。
フォナックは、人々がそれぞれの人生において、
豊かな音を聞き取り、理解し、経験できるように、
これからも独創的な発想で
テクノロジーの限界に挑みつづけます。

自由な交流と自信に満ちたコミュニケーション。
豊かな人生のために、さあ Life is on!

スイスのデジタル補聴器 フォナック www.phonak.jp

製造販売業：フォナック・ジャパン株式会社
〒141-0031 東京都品川区西五反田5-2-4 レキシントン・プラザ西五反田
TEL:0120-06-4079 (お客様相談窓口) FAX:0120-23-4080
許可番号 13B2X10021

フォナック補聴器のご相談・ご用命は…



6月6日は
補聴器の日

※補聴器は適切なフィッティング調整により、その効果が発揮されます。しかし、装用者の「聞こえ」の状態によっては、その効果が異なる場合があります。

このカタログの内容は2010年10月現在のものです。

セルティナアート機能一覧

	耳あな型					耳かけ型	
	CIC / CIC P	ITC	ITC dAZ / ITC P dAZ	FS dAZ / FS P dAZ	FS P	M / P / SP	マイク
チャンネル	6					6	
マニュアルプログラム	2+2					2+2	
指向性	無指向性		digital AudioZoom		無指向性	digital AudioZoom	
雑音抑制	ノイズブロック (6ch)					ノイズブロック (6ch)	
ハウリング抑制	ホイッスルブロック					ホイッスルブロック	
サウンドフロー	スタンダード					スタンダード	
サウンドリカバリー	■	■	■	■	■	■	■
データログ	■	■	■	■	■	■	■
クイックシンク*1		■*4	■*4	■	■	■	■
プログラムスイッチ	*2	■*3	■*3	■*3	■*3	■	■
ボリュームコントロール		*2	*2	*2	*2	■	■
Tコイル		■	■	■	■	■	■
イージーフォン		■	■	■	■	■	■
イージーオーディオ		■*4	■*4	■	■	■	■
イージーBluetooth		■*4	■*4	■	■	■	■
ケーブルフリーフィッティング		■*4	■*4	■	■	■	■
フィッティングソフトウェア	iPFG2.6以上					iPFG2.6以上	
【デジタルワイヤレスアクセサリ】							
マイパイロット		□*4	□*4	□	□	□	□
フォナックマイコム		□*4	□*4	□	□	□	□
アイビュー		□*4	□*4	□	□	□	□
キーパイロット2	□	□	□	□	□	□	□
クロスリンク						□	
【FMシステム】							
マイリンク・プラス		□	□	□	□	□	□
一体型受信機						ML9i	ML12i
MLxi						AS9-MLxS	AS12
MLxi (+フォナックマイコム)		□*4	□*4	□	□	□	□

■：標準 □：オプション *1：両耳装着時の機能です。*2：オプションで付けることも可能です（無償）。*3：オプションで外すことも可能です（無償）。*4：プッチタイプを除きます。

セルティナアート性能一覧

		CIC	CIC P	ITC / ITC dAZ	ITC P dAZ	FS dAZ	FSP / FSP dAZ	M	P	SP	マイク
最大出力音圧レベル	1600Hz <dB±5dB>	115	121	115	122	117	129	129	132	132	118
	ピーク値 <dB以下>	127	129	127	132	130	137	135	144	144	133
最大音響利得(50dB入力)	<dB±5dB>	34	59	48	57	50	57	55	60	66	53
全高調波ひずみ	500Hz <%以下>	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4
	800Hz <%以下>	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3
	1600Hz <%以下>	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
誘導コイル感度	<dB±6dB>	-	-	80	90	81	90	85	93	100	82
使用電池		PR536(10A)	PR536(10A)	PR41(312)	PR41(312)	PR48(13)	PR48(13)	PR48(13)	PR48(13)	PR48(13)	PR48(13)
電池寿命	<時間>	75~100	60~80	90~130	90~130	140~220	140~220	155~240	140~220	140~220	130~200

※本データはJIS C 5512:2000の密閉形疑似耳により、測定、表示してあります。※本カタログに掲載された電池寿命：JIS規格に基づいて測定した電流値から換算した参考値です。フォナック純正電池を使用したときの目安です。ご使用の状況や気温、湿度等の環境の影響によって電池寿命は大幅に変わります。※本カタログ掲載の各製品の仕様は予告なく変更される場合があります。※「コントロール」「ワイヤレス接続」機能をご使用の場合、電池寿命が短くなります。

セルティナアート

Certéna Art

Reassurance. More Hearing.



新しい楽しみが、広がっていく。




「聞こえ」から始まる、新しい楽しさを。
セルティナ アートは、世界のフォナックから。

たとえば、木々を抜けていく爽やかな風の音。
たとえば、家族や友人との、とりとめのないおしゃべり。
毎日のなにげない「聞こえ」の中に、
歓びが満ちていることを私たちは知っています。
だからこそ、「聞こえ」から始まる楽しさを
もっともっと広げていきたい。

セルティナ アートは、新世代CORE<コア>テクノロジーが
もたらす基本性能をさらに磨き上げ、新たに
高音域の聞き取りを改善する「サウンドリカバー」を搭載。
さらにTVや音楽を満喫できるワイヤレス機能も充実。
暮らしをいきいきと楽しむあなたに、
補聴器の新しいスタンダードを。

新搭載!

聞き取りづらい音をもっとクリアに楽しむ「サウンドリカバー」*。

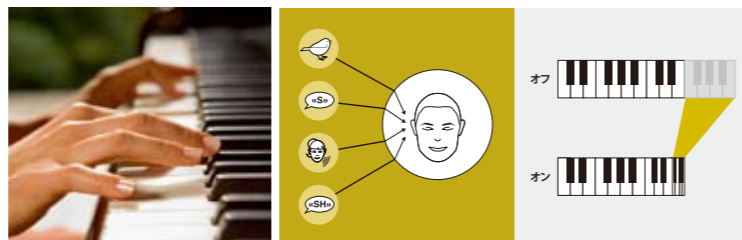

聞き取りづらい高音域の音を、聞こえる音域まで圧縮。
よりクリアな会話を始め、心地よい鳥のさえずりなど、
豊かな音の風景を日常に取り戻します。この機能を支える
フォナック独自開発の「ノンリニア周波数帯域圧縮」は、
数々の臨床経験の結果、より広範囲の難聴度や
聴力タイプにも応用できることが証明されています。

*オーストラリア メルボルン大学との共同開発により実現。




リアルタイムに音環境に適応する
「サウンドフロー スタンダード」。




変化する音環境を瞬時に分析し、その場に合わせた自動的
ブレンドされたプログラムが、自然な聞き取りを可能にします。

ワンタッチで両耳のプログラム
調整ができる「クイックシンク」。

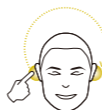

ボリュームやプログラムの変更が片側の補聴器だけで済む
機能。瞬時に両側とも切り替わるのでとても便利です。

騒音が多い場所で聞き取りやすく。
「デジタルオーディオズーム」。

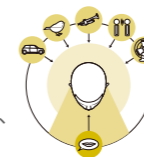

後方と両側に存在する最も大きな騒音を抑え、
正面の言葉を聞き取りやすくします。

その他の機能 ※搭載機種については裏面の機能一覧をご覧ください。

- 騒音下でもより快適な聞こえを実現する「ノイズブロック」。
- 不快なハウリング音を抑制する「ホイッスルブロック」。
- 音量などの調整履歴を補聴器本体に記録する「データログ」。

つながる、楽しさ。ワイヤレス機能で、
ライフスタイルはもっと自由に広がる。

会話はもちろん、TVや音楽を、もっと楽しみたいあなたへ。
セルティナアートなら携帯電話やTV、MP3プレーヤー、
コンピューターなどとワイヤレスにつながり、
自由な「聞こえ」の世界を広げます。



フォナック マイコム
26,040円(税込)

マイコム
テレビパッケージ
36,540円(税込)

マイパイロット
47,250円(税込)

※詳しくは総合カタログをご覧ください。

セルティナアート【耳かけ型】



●Tコイル標準装備/FM受信機対応(CICとCIC Pは除く)。●補聴器は非課税です。

セルティナアート【耳あな型】



*CICとCIC P、プチタイプは「クイックシンク」、「マイパイロット」、
「フォナックマイコム」、「アイビュー」に対応しておりません。

■セルティナアート マイクロ カラーバリエーション【全13色】※標準色は01です。



■セルティナアート カラーバリエーション【全15色】※標準色は01です。

