



Life is on

「聞こえ」に悩むすべての人の声に耳を傾け、
よりよい知識、アイデア、
そして聴覚ケアをお届けする。
フォナックは、人々がそれぞれの人生において、
豊かな音を聞き取り、理解し、経験できるよう、
これからも独創的な発想で
テクノロジーの限界に挑みつづけます。

自由な交流と自信に満ちたコミュニケーション。
豊かな人生のために、さあ Life is on!

スイスのデジタル補聴器


フォナック

www.phonak.jp

製造販売業：フォナック・ジャパン株式会社
〒141-0031 東京都品川区西五反田5-2-4 レキシントン・プラザ西五反田
TEL:0120-06-4079 (お客様相談窓口) FAX:0120-23-4080

許可番号 13B2X10021

フォナック補聴器のご相談・ご用命は…



6月6日は
補聴器の日

※補聴器は適切なフィッティング調整により、その効果が発揮されます。しかし、装用者の「聞こえ」の状態によっては、その効果が異なる場合があります。

このカタログの内容は2010年10月現在のものです。

ベルサータ アート機能一覧

	耳あな型					耳かけ型	
	CIC / CIC P	ITC	ITC VZ / ITC P VZ	FS VZ / FS P VZ	FS P	M / P / SP	マイク
チャンネル	16					16	
マニュアルプログラム	4					4	
指向性	無指向性		VoiceZoom (12ch)		無指向性	VoiceZoom (12ch)	
雑音抑制	ノイズブロック (16ch)					ノイズブロック (16ch)	
ハウリング抑制	ホイッスルブロック					ホイッスルブロック	
サウンドフロー	アドバンス					アドバンス	
サウンドリカバリー	■	■	■	■	■	■	■
ウインドブロック	■	■	■	■	■	■	■
データログ	■	■	■	■	■	■	■
セルフラーニング	■	■	■	■	■	■	■
リアルイヤーサウンド						■	■
クイックシンク*1		■*4	■*4	■	■	■	■
プログラムスイッチ	*2	■*3	■*3	■*3	■*3	■	■
ボリュームコントロール		*2	*2	*2	*2	■	■
Tコイル		■	■	■	■	■	■
イージーFM						■	■
イージーフォン		■	■	■	■	■	■
イージーオーディオ		■*4	■*4	■	■	■	■
イージーBluetooth		■*4	■*4	■	■	■	■
ケーブルフリーフィッティング		■*4	■*4	■	■	■	■
フィッティングソフトウェア	iPFG2.6以上					iPFG2.6以上	
【デジタルワイヤレスアクセサリ】							
マイパイロット		□*4	□*4	□	□	□	□
フォナックマイコム		□*4	□*4	□	□	□	□
アイビュー		□*4	□*4	□	□	□	□
キーパイロット2	□	□	□	□	□	□	□
クロスリンク						□	
【FMシステム】							
マイリンク・プラス		□	□	□	□	□	□
一体型受信機						ML9i	ML12i
MLxi						AS9-MLxS	AS12
MLxi (+フォナックマイコム)		□*4	□*4	□	□	□	□

■：標準 / □：オプション *1：両耳装着時の機能です。*2：オプションで付けることも可能です(無償)。*3：オプションで外すことも可能です(無償)。*4：プッチタイプを除きます。

ベルサータ アート性能一覧

		CIC	CIC P	ITC / ITC VZ	ITC P VZ	FS VZ	FSP / FSPVZ	M	P	SP	マイク
最大出力音圧レベル	1600Hz (dB±5dB)	115	121	115	122	117	129	129	132	132	118
	ピーク値 (dB以下)	127	129	127	132	130	137	135	144	144	133
最大音響利得(50dB入力)	(dB±5dB)	34	59	48	57	50	57	55	60	66	53
全高調波ひずみ	500Hz (<%以下)	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4
	800Hz (<%以下)	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3
	1600Hz (<%以下)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
誘導コイル感度	(dB±6dB)	-	-	80	90	81	90	85	93	100	82
使用電池		PR536(10A)	PR536(10A)	PR41(312)	PR41(312)	PR48(13)	PR48(13)	PR48(13)	PR48(13)	PR48(13)	PR48(13)
電池寿命	(時間)	75~100	60~80	90~130	90~130	140~220	140~220	155~240	130~200	130~200	130~200

※本データはJIS C 5512:2000の密閉形擬似耳により、測定、表示してあります。※本カタログに掲載された電池寿命：JIS規格に基づいて測定した電流値から換算した参考値です。フォナック純正電池を使用したときの目安です。ご使用の状況や気温、湿度等の環境の影響によって電池寿命は大幅に変わります。※本カタログ掲載の各製品の仕様は予告なく変更される場合があります。※「コントロール」「ワイヤレス接続」機能をご使用の場合、電池寿命が短くなります。

ベルサータ アート

Versáta Art

Versatility. More Hearing.



「聞こえ」の楽しさを、もっと豊かに。



life is on

人生を、思うままに楽しむために。
「サウンドリカバー」を新たに搭載して
ベルサータ アート、誕生。

愛する人と穏やかに時間を過ごすとき。

パーティで気の置けない友人達と賑やかに語らうとき。

そして、自然の中でスポーツに興じる時。

変化する音環境に、「聞こえ」がスムーズに適応できれば、
人生をもっと豊かに楽しむことができるはず。

そうした想いをカタチにしたのが、ベルサータ アート。

新世代CORE<コア>テクノロジーによる

優れた基本性能に加え、高音域の聞き取りを改善する

「サウンドリカバー」を新たに搭載。さらに携帯電話やTV、


MP3プレーヤーにもワイヤレスでつながるなど、

日々を楽しむための数々の先進機能を結集しています。

アクティブに進化した補聴器を、いま、あなたへ。

新搭載!

聞き取りづらい音をもっとクリアに楽しむ「サウンドリカバー」*。

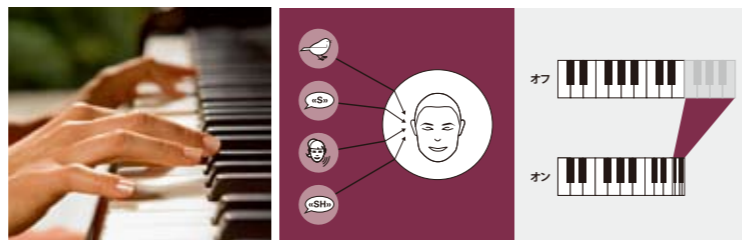

聞き取りづらい高音域の音を、聞こえる音域まで圧縮。
よりクリアな会話をはじめ、心地よい鳥のさえずりなど、
豊かな音の風景を日常に取り戻します。この機能を支える
フォナック独自開発の「ノンリニア周波数帯域圧縮」は、
数々の臨床経験の結果、より広範囲の難聴度や
聴力タイプにも応用できることが証明されています。

*オーストラリア メルボルン大学との共同開発により実現。



リアルタイムに音環境に適応する
「サウンドフロー アドバンス」。



変化する音環境を瞬時に分析し、その場に合わせた自動的に
ブレンドされたプログラムが、自然な聞き取りを可能にします。
アドバンスは「騒音下の快適性」にも適応します。

ワンタッチで両耳のプログラム
調整ができる「クイックシンク」。



ボリュームやプログラムの変更が片側の補聴器だけで済む
機能。瞬時に両側とも切り替わるのでとても便利です。

雑踏の中での会話もスムーズに。
「ボイスズーム」。



12チャンネルによる高性能な指向性マイクロホンを搭載した
ボイスズームにより、聞きたい音の明瞭性を高めます。

その他の機能 ※搭載機種については裏面の機能一覧をご覧ください。

- 騒音下でもより快適な聞こえを実現する「ノイズブロック」。
- 不快なハウリング音を抑制する「ホイッスルブロック」。
- 音量などの調整履歴を補聴器本体に記録する「データログ」。
- 風切り音を効果的に抑制する「ウインドブロック」。
- 音量の好みを学習し自動的に適応させる「セルフラーニング」。

つながる、楽しさ。ワイヤレス機能で、
ライフスタイルはもっと自由に広がる。

会話はもちろん、TVや音楽を、もっと楽しみたいあなたへ。
ベルサータ アートなら携帯電話やTV、MP3プレーヤー、
コンピューターなどとワイヤレスにつながり、
自由な「聞こえ」の世界を広げます。



フォナックマイコム
26,040円(税込)



マイコム
テレビパッケージ
36,540円(税込)



マイパイロット
47,250円(税込)



※詳しくは総合カタログをご覧ください。

ベルサータ アート【耳かけ型】



●Tコイル標準装備/FM受信機対応(CICとCIC Pは除く)。●補聴器は非課税です。

ベルサータ アート【耳あな型】



*CICとCIC P、ブチタイプは「クイックシンク」、「マイパイロット」、
「フォナックマイコム」、「アイビュー」に対応しておりません。

■ベルサータ アート マイクロ カラーバリエーション【全13色】※標準色は01です。



■ベルサータ アート カラーバリエーション【全18色】※標準色は01です。

